

smiths medical

bringing technology to life

L'ago del mio paziente HIV+
in un attimo urtò la mia mano,
per fortuna stavo usando

Acuvance.....







NEW **PROTECTIV***
ACUVANCE*

I . V . SAFETY CATHETER







Entra a

PUNTURE ACCIDENTALI - CONOSCI I RISCHI?


-  L'operatore sanitario ha un altissimo rischio di contrarre l'HIV ed altre patologie trasmesse per via ematica ⁽¹⁾.
-  Approssimativamente 100' operatori sanitari in Europa hanno contratto HIV ⁽²⁾. Tra gli operatori sanitari che hanno contratto HCV, l'80% possono diventare portatori cronici (anche per tutta la vita) ⁽³⁾, ed una grossa percentuale di questi dovranno ricorrere al trapianto di fegato.
-  Gli aghi introduttori dei cateteri I.V. (aghi cavi e con forte inoculo di sangue) comportano la maggiore incidenza di punture accidentali ad alto rischio ^(4,5).
-  Nonostante l'istruzione e l'addestramento, l'utilizzo di dispositivi progettati per ridurre tali lesioni rappresenta la migliore opportunità per diminuire le punture accidentali ⁽⁶⁾.

† casi possibili e definiti

SMITHS HA COMBINATO LA PROTEZIONE ALLA FACILITÀ D'UTILIZZO

-  L'utilizzo del catetere Acuvance* non richiede cambiamenti della tecnica d'inserzione e non richiede procedure addizionali.
-  Una protezione smussa è posizionata all'interno dell'ago. L'allineamento di precisione dell'ago ed il meccanismo di protezione permette un "flash-back" normale.
-  Una volta inserito il catetere il meccanismo di sicurezza si estende fino a coprire la punta dell'ago prima della rimozione dal paziente, riducendo significativamente il rischio di puntura accidentale.
-  L'utilizzo dei cateteri I.V. di sicurezza riducono la percentuale di punture accidentali fino al 84% rispetto ai presidi convenzionali (5).

ffilato....

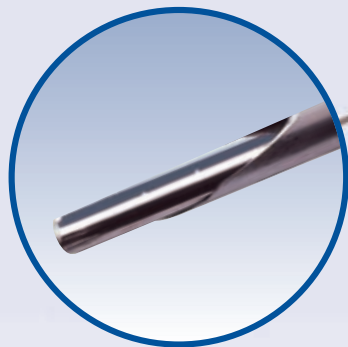

....Esce protetto

PRESTAZIONI SU CUI PUOI CONTARE



**Accurata affilatura
dell'ago e
rastrematura di
precisione del catetere**

- inserzione
atraumatica
- riduzione del disagio
al paziente



poliuretano OCRILON* ++

- ottimizza tempi di
permanenza
- è stata dimostrata
clinicamente una
riduzione nell'incidenza
delle flebiti del 60% ⁽⁶⁾
- trasparente e radiopaco



**Ampia Camera di
"Flash-back"**

- visualizzazione
chiara del ritorno
sanguigno
- facilità d'utilizzo



ACUVANCE® RIDUCE IL RISCHIO DI PUNTURE ACCIDENTALI

PROTECTIV* ACUVANCE*

CATETERE I.V. DI SICUREZZA MONOVIA



	Calibro	Codice	Lunghezza mm.	Ø Esterno mm.	Portata ml/min.
	14	3358	51	2.2	293
	16	3342	32	1.8	195
	16	3352	51	1.8	185
	18	3354	45	1.3	92
	18	3355	32	1.3	94
	20	3356	32	1.1	53
	20	3357	25	1.1	56
	20	3359	45	1.1	51
	22	3350	25	0.9	33
	24	3353	19	0.7	22

PROTECTIV* ACUVANCE*2

CATETERE I.V. DI SICUREZZA CON VIA ACCESSORIA DI INFUSIONE



	Calibro	Codice	Lunghezza mm.	Ø Esterno mm.	Portata ml/min.
	14	1714	45	2.2	315
	16	1716	45	1.8	210
	18	1718	45	1.3	100
	18	1719	32	1.3	110
	20	1720	32	1.1	65
	22	1722	25	0.9	38

Acuvance* è monouso ed è dotato di un dispositivo di protezione dalle punture accidentali. Effettuare la venipuntura e smaltire gli aghi in conformità alle procedure ospedaliere.

Bibliografia: 1. Gerberding, J.L. Management of occupational exposures to blood-borne viruses N. Engl. J. Med. 1995; 332: 444-451 2. Evans BG, Abiteboul D. Eurosurveillance March 1999; 4(3): 29-32. 3. Haslett C, et al Davidson's Principles and Practice of Medicine 18th Edition. Churchill Livingstone 1999; Ch 2 & 10: 87-107, 706-715. 4. Ippilito G et al. Prevention Management and Chemoprophylaxis of Occupational Exposure to HIV International Health Care Worker Safety Center, University of Virginia 1997 5. Advances in Exposure Prevention 1998; 3(4): 37-48. 6. Stebor A.D. Liao J. M.D. Ph.D Dept. of Epidemiology and Biostatistics Univ. of South Florida. A Peripheral Catheter Indwell Study Comparing Phlebitis Rates Between Two Different Catheter Materials.

Smiths Medical Italia S.r.l.

Sede Legale e Amministrativa:

Via della Stazione, 2 - 04013 Latina
Tel. 0773 40841
Fax 0773 4084804

Uffici Commerciali:

Viale Europa, 68 - 20090 Cusago MI
Tel. +39 02 90165359 - Fax +39 02 90165360
CustomerService.Italia@smiths-medical.com

smiths medical

bringing technology to life

www.smiths-medical.com

ISO 13485:1996
MD 68025

